

oto·fresh®
D R Y **B O X**



Návod na obsluhu

Sušiaci box na načúvacie prístroje
s dezinfekčným 360° UV-C svetlom

Podrobnosti o funkciách

360° UV-C

Oto-fresh DRYBOX je vybavený krátkovlnnou UV-C lampou, ktorej 360° kruhové usporiadanie umožňuje dosiahnuť na celý povrch načúvacieho prístroja. Starostlivosť o načúvací prístroj sa dosahuje kombináciou sušenia pulzujúcim teplým vzduchom a 360° UV-C žiarením. Lampa svieti počas prvých piatich minút ošetrovacieho cyklu, potom sa automaticky vypne.

Sušenie

Oto-fresh DRYBOX je vybavený patentovaným systémom pulzného sušenia vzduchom. Vďaka tomu sa znižuje potrebný výkon aj celkový čas sušenia. Teplota v ošetrovacej komore je riadená elektronickým systémom tak, aby maximálna teplota nepresiahla 45 °C +/- 3 °C bez ohľadu na izbovú teplotu, čím sa zabraňuje poškodeniu načúvacích prístrojov.

Na zachovanie optimálnej kvality načúvacieho prístroja sa odporúča **každodenné používanie** prístroja DRYBOX.

Smernica o zdravotníckych pomôckach

Tento prístroj spĺňa požiadavky smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

Technické údaje

Int. rozmer	70x21x51mm	Software	PDLLOG02.00
Ext. rozmer	93x48x76mm	Skladov.	-20°C až +65°
Váha	144g	Poč. cyklov	1
UV lampa	263,7nm	Teplota	<45°C
Max. výkon	4W	Trvanie cykl	30 minút
Min. výkon	0.04W	Tepl. okolia	12°C až 40°C

Napájací zdroj

Vstup: 100-240V / AC / 50 – 60 Hz

Výstup: 5V / DC

Konektor: USB kábel / microUSB

Bezpečnostné pokyny

Uchováajte mimo dosahu detí. Zásahy, okrem čistenia a bežnej starostlivosti vykonávanej používateľom, musia byť vykonané servisom výrobcu alebo predajcu.

Neponárajte DRYBOX, napájací kábel ani adaptér do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Ak je napájací kábel alebo adaptér poškodený, prístroj nepoužívajte a ihneď ich vymeňte. Sieťový adaptér nahrádzajte len originálnym modelom. Umiestnite DRYBOX na rovný, suchý a stabilný povrch. Nepozerajte sa priamo do UV-C lampy umiestnenej v sušiackej komore. Pri odpájaní ťahajte za adaptér, nie za kábel. Na čistenie DRYBOXU nikdy nepoužívajte čistiace ani žieravé prostriedky. Nedodržanie týchto pokynov má za následok stratu

záruky. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo manipuláciou.

Odporúčania na starostlivosť o výrobok

Čistite mäkkou handričkou. Do prístroja nestriekajte žiadne kvapaliny. Keď oto-fresh DRYBOX nepoužívate, majte ho zatvorený, aby sa do neho nedostali nečistoty.


Záruka

Záruka na zariadenie je 36 mesiacov. V prípade poruchy sa obráťte na svojho špecialistu na načúvacie prístroje. Počas záručnej doby bude pri všetkých úkonoch vykonávaných zákazníckym servisom vyžadovaný doklad o kúpe. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nehodou, mimoriadnou udalosťou alebo podobným poškodením, vniknutím kvapaliny, nedbanlivosťou, nevhodným používaním, akýmkoľvek rozobratím prístroja, nedostatočnou starostlivosťou ani inými okolnosťami zavinenými používateľom. Táto záruka sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené bleskom alebo iným kolísaním elektrického napätia. Ako preventívne opatrenie prosím DRYBOX počas búrky odpojte od elektrickej siete.

1.

Zapojte oto-fresh DRYBOX do elektrickej siete. Rozsvieti sa modrý indikátor, ktorý signalizuje, že prístroj je zapnutý.

Ak sa do 30 sekúnd nevykoná žiadna akcia, indikátor zhasne.

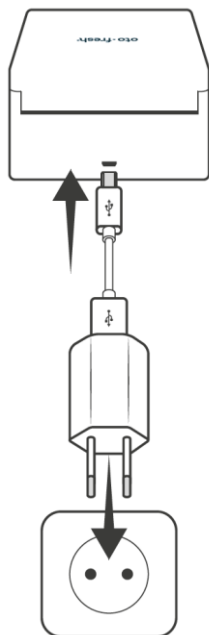


2.

Vyčistite načúvacie prístroje pomocou suchej, mäkkej utierky, aby ste odstránili prebytočné nečistoty. Potom otvorte priehradky na batérie vo vašich načúvacích prístrojoch (batérie môžu počas cyklu zostať vo vnútri načúvacích prístrojov). Nabíjacie načúvacie prístroje, pred sušiacim cyklom manuálne vypnite.

Tip: Prístroje značky ReSound a Beltone vypnete podržaním tlačidla na 6 sekúnd dokiaľ LED dióda trikrát nezabliká.


Vložte načúvacie prístroje do DRYBOXU a zatvorte veko.

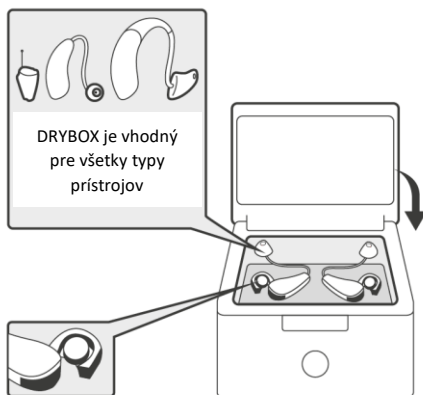

3.

Jedným stlačením dotykového tlačidla spustíte cyklus. Modrý indikátor pomaly bliká, čo signalizuje, že sušiaci box je v prevádzke. Sušiaci cyklus prebieha iba vtedy, ak je veko zatvorené.


Oto-fresh DRYBOX sa po skončení ošetrovacieho cyklu (30 minút) automaticky zastaví a indikátor zhasne.

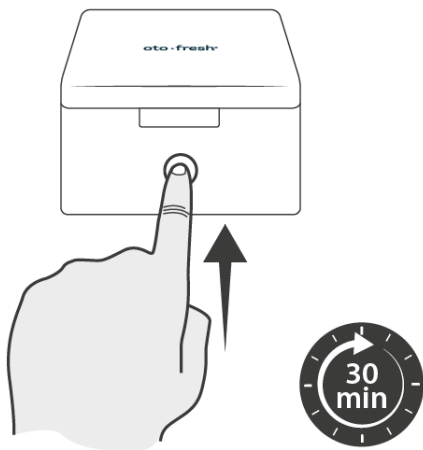

Upozornenie

Pred spustením cyklu sa uistite, že je veko zatvorené. Zároveň dbajte na to, aby ste veko počas prevádzky neotvárali – v prípade otvorenia sa DRYBOX z bezpečnostných dôvodov automaticky zastaví.

Význam svetelného indikátoru

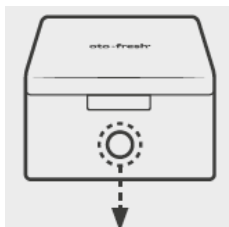

MODRÁ bliká ----- Sušiaci cyklus v prevádzke

MODRÁ svieti ----- Pripravené na použitie

Zoznam symbolov

Tieto symboly nájdete na spodnej strane vášho oto-fresh DRYBOX

V Volt (napájanie)

A Ampér (napájanie)



Symbol USB napájania



Použitie v interiéri



Výrobok je vyrobený z ABS s recyklačným kódom 7.



Tento výrobok spĺňa všetky európske smernice vzťahujúce sa na zdravotnícke pomôcky.



Likvidujte ekologickým spôsobom. Obsahuje recyklovateľné materiály, ktoré je možné opätovne získať.

POZNÁMKY:

oto·fresh®

DRY BOX

Číslo produktu: 6127

Výrobca:

MG Développement
ZA aéroport de montpellier
34470, Pérols – Francúzsko

Distribútor, záručný a pozáručný servis:

AUDIOFON s.r.o
Kapitána Jaroša 3A
974 11, Banská Bystrica, Slovensko
048 / 414 27 12
bb@audiofon.sk

VYROBENÉ V EÚ

